

Domotherm® Mundschutz FFP2-Masken

Atemschutzmaske mit CE-Kennzeichnung, erfüllt den Prüfstandard EN149:2001+A1:2009 der Schutzklasse FFP2 (PSA = persönliche Schutzausrüstung)



FFP2 ATEMSCHUTZMASKE schwarz

Filterierende Halbmaske gegen Partikel

- Filtert sowohl eingeatmete als auch ausgeatmete Luft und dient somit als interner und externer Schutz
- Formbarer Nasenbügel
- Elastische Gummibänder
- Für Erwachsene

EINFACHE ANWENDUNG:

Entfalten Sie die Maske. Legen Sie die Maske unter das Kinn und bedecken Sie Mund und Nase. Legen Sie nun die Ohrschlaufen an. Drücken Sie den formbaren Nasenbügel so, dass er sich eng an die Nase anschmiegt. Um den Sitz zu prüfen, legen Sie beide Hände über die Maske und atmen Sie kräftig aus. Wenn Luft um die Nase strömt, drücken Sie den Nasenbügel fest. Wenn Luft am Rand austritt, positionieren Sie die Ohrschlaufen neu, um den Sitz zu verbessern. Überprüfen Sie erneut die Abdichtung und wiederholen Sie den Vorgang, bis die Maske richtig abdichtet.

Anwendungsbereich:

Indikation für die Verwendung:

Filterierende Halbmaske zum Schutz vor COVID-19. Sie darf nur für einen Einschichtbetrieb verwendet werden.

Wie in den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation gefordert, ist der nominale Schutzfaktor dieser filterierenden Halbmaske für diese spezielle Anwendung der gleiche wie der FFP2-Nominalschutzfaktor, der in EN 149:2001+A1:2009 definiert ist.

Schutzstufe: FFP2

Hauptrohstoff: PP-Vliesstoff, Heißluft-Baumwolle und Schmelzblasgewebe
Ausführender Standard: PPE-R/02.075 Version 2

20 Stück



PZN 17941267

Art. Nr. 11310

EC REP ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana,
141-Planta 19, 28046-Madrid, SPAIN



2022-02

Vertreiber: UEBE Medical GmbH
Bürgermeister-Kuhn-Straße 22
97900 Kulsheim, Deutschland

MD Medizin-
produkt

UEBE
Germany est. 1890